



- ※1 販売名:ステラリス
医療機器承認番号:22100BZX00788000
- ※2 販売名:IAVPsパック PC
医療機器承認番号:22400BZX00010000
- ※3 販売名:IAVPsパック アンテリア
医療機器承認番号:23000BZX00206000
- ※4 販売名:IAVPsパック デュアルインフュージョン
医療機器届出番号:13B1X00001000034
- ※5 販売名:超音波ニードル
医療機器承認番号:21700BZY00096000
- ※6 販売名:バイポーラコード
医療機器届出番号:13B1X00001000027
- ※7 販売名:IAVPsパック
医療機器承認番号:20200BZY00910000
- ※8 販売名:単回使用眼科用バイポーラ電極
医療機器認証番号:303AGBZX00053000
- ※9 販売名:眼科用バイポーラ電極
医療機器認証番号:220AGBZX00240000
- ※10 販売名:眼科用I/Aハンドピース TMT
医療機器届出番号:13B1X00001000017
- ※11 販売名:眼科用I/Aハンドピース SG
医療機器届出番号:13B1X00001000016
- ※12 販売名:IAVPsパック イルミネーション
医療機器届出番号:13B1X00001000033

【製造販売元】
ボシュロム・ジャパン株式会社

【販売代理店】
株式会社 **モリア ジャパン**
〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-12-3 アルカディアビル6F
TEL:03-6260-8309/FAX:03-6260-8310 <http://www.moriajapan.com>

B+L2021001-3

Stellaris Elite™

Vision Enhancement System




BAUSCH+LOMB 

Anterior & Combo

簡単操作で手術を分かりやすく快適に

Graphic User Interface

簡単で分かりやすいイラストや日本語表示と音声機能

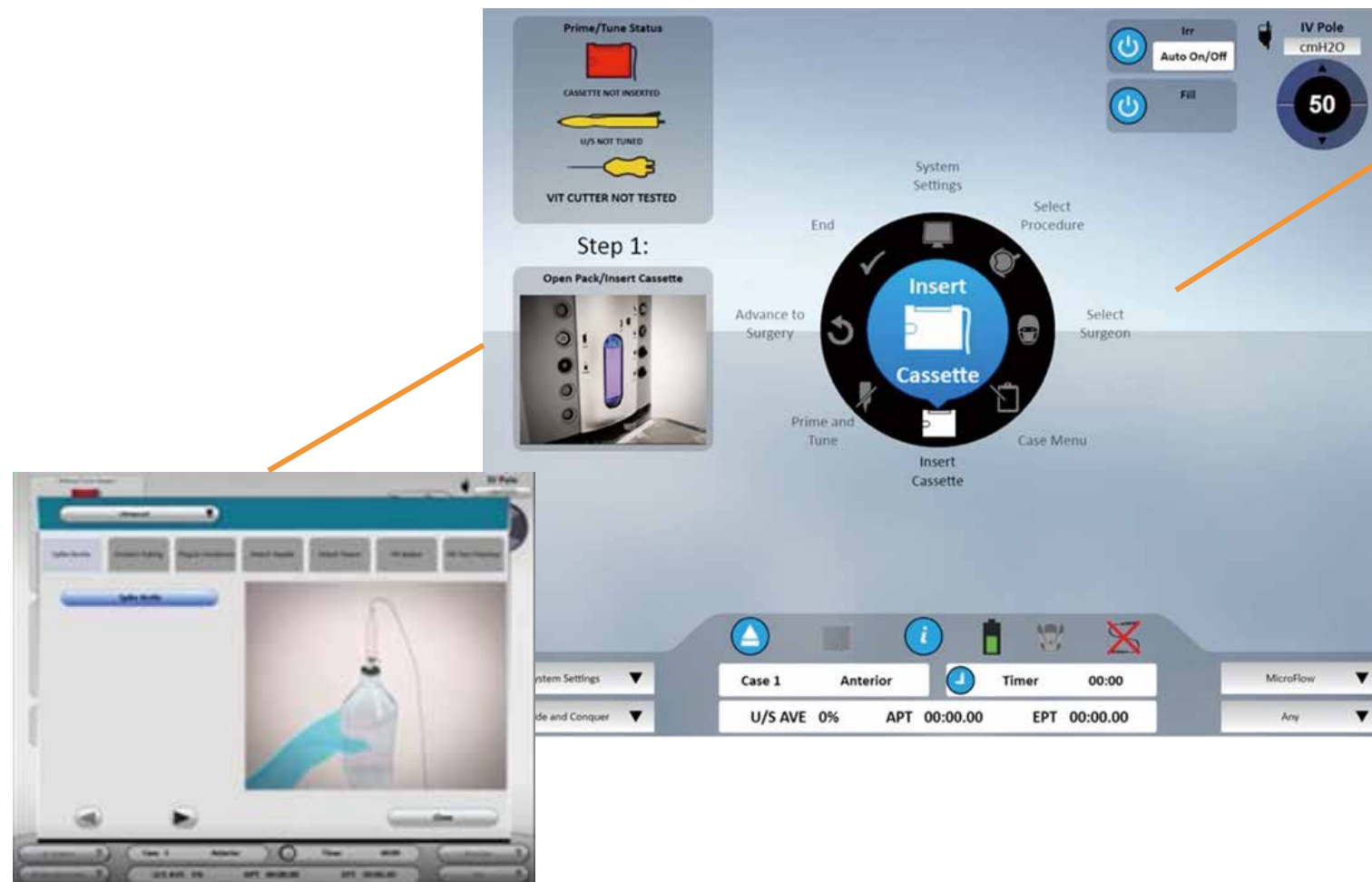

◆ 見やすいクロックメニューには、常時使用する手術手順を表示、切り替え可能



◆ “セットアップ手順の表示”ボタンから術前のセットアップから術後の取り外し手順までいつでもアニメーションで確認可能



◆ シンプルなレイアウトと見やすい大きなアイコン
◆ 設定やステータスがすべてホーム画面にて確認、変更可能

WIRELESS DUAL LINEAR FOOT PEDAL

変化する眼内環境に応じた優れた 応答性とコントロール

- ◆ Pitch (上下方向) とYaw (左右方向) に動くフットペダルを操作し、**吸引圧、超音波パワー、灌流を同時にコントロール可能**
- ◆ 術者の好みに応じたカスタマイズが可能



Anterior Features

連携した二つのシステムで白内障手術をより*効率的に

Adaptive Fluidics™

1. モニタリング

Adaptive Fluidics™は術中の吸引圧を常にモニタリングし、

2. カウンターバランス

吸引圧の変化に応じ、灌流圧を自動調節するシステムです。

3. IOPの安定性

これにより、安定した眼内圧の維持が可能になります。

Attune® Energy Management

さらなるパフォーマンス向上を目指して

💡 Six Piezoelectric Crystals、28.5kHzフェイコハンドピース

2つのエネルギー、物理的（切断）エネルギーと超音波（キャビテーション）エネルギーをバランスよく組み合わせたハンドピースです。



◆ 6ピエゾクリスタル搭載により…

1. 小さいエネルギー（超音波パワー設定）、
2. 正確かつ安定したストロークレングス (Max 150µm) で水晶体核を破壊します。


- ◆ 28.5kHzの周波数にすることでキャビテーションバブルによるエネルギーを利用し効率よく水晶体を乳化します。

Combo Features


Anteriorの機能はそのままに、
白内障手術、硝子体手術、同時手術モードが選択可能。

Bi-Blade™ Dual-port Vitre ctomy Cutter

前後両方向でカットするためCPMは2倍、かつ吸引効率は一様に保たれます。

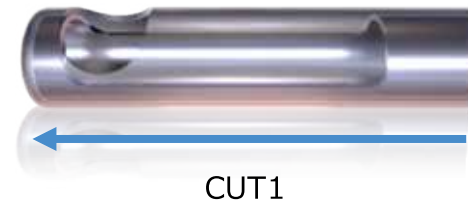

CUT1

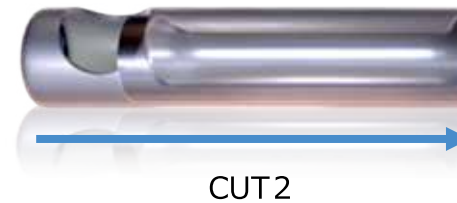

CUT2

- ◆ 2カット/ストローク
- ◆ 最大カットレート: *15,000CPM

*装置の表示は7,500CPM


Comprehensive Visualization Technology

明るいキセノン光源は優れた視認性を実現します。

- ◆ 選べる照明 ・シャンデリア ・イルミネーター




WIDEFIELD ILLUMINATION PATTERN

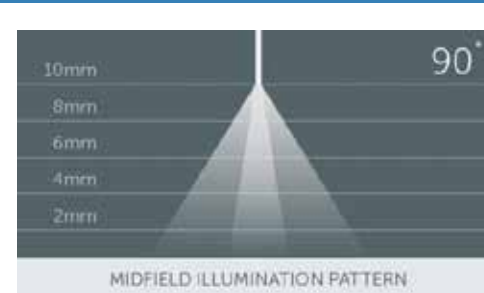

MIDFIELD ILLUMINATION PATTERN

3つの内蔵カラーフィルター

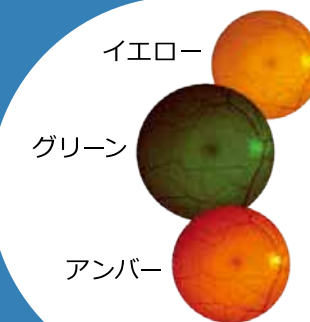

- ◆ イエロー&グリーン: ブルーライトを軽減します。
- ◆ グリーン: 構造や膜をより詳細に見やすくします。
- ◆ アンバー: まぶしさを抑えます。

Laser System

💡 フットコントローラー体型 スイッチで使いやすくコンパクト!



①



②

- ①: レーザーを使用していない時
レーザースイッチはかかと部分 (ヒールレスト) 下にありヒールレストで覆われた安全を考慮した設計です。
- ②: レーザーを使用する時
ヒールレストを上げるとスイッチが入ります。



BL11145 ※1
ステラリス エリート (Anterior)

BL14455 ※1
ステラリス エリート (Combo)

BL15455 ※1
ステラリス エリート (Combo)
*レーザーモジュール搭載

BL2394 ※1
フットコントロール
フットコントロールアクセサリ ※1

BL4390 バッテリー
BL4391 充電器
BL4393 充電クレードル
BL4394 パワーケーブル



BL4363
ゼロレベルボトルハンガー ※1



BL4364
トレイアダプター ※1



BL2300HD
DMS (デジタルメディアシステム)



BL3320 キセノンランプモジュール ※1
BL3321 キセノン水銀ランプモジュール ※1



BL3170
フェイコハンドピース ※1



BL3270
フラグマハンドピース ※1



BL5275
フラグメンテーション ニードル ※2


STERILE ② = 1



Adaptive Fluidics™ Pack ※3


BL5115-1
Adaptive Fluidics™ プレミアムパック

- A. 2.4mm スリーブ
- B. ブルー 2.0MICS ニードル
- C. マイクロメッシュフィルター

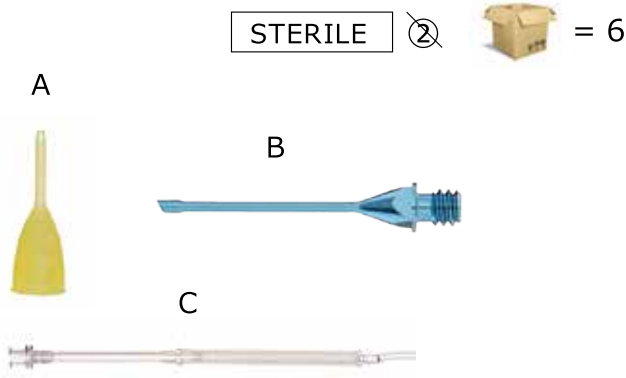


BL5115-3
Adaptive Fluidics™ MICSプレミアムパック

- A. MICS スリーブ
- B. ブルー 2.0MICS ニードル
- C. マイクロメッシュフィルター

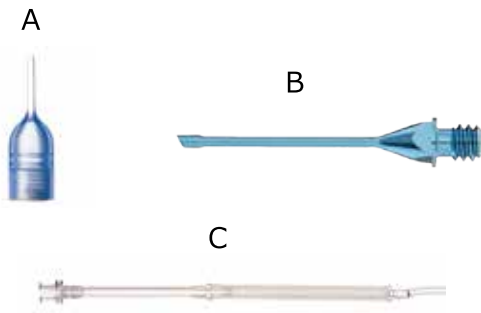

BL5115-2
Adaptive Fluidics™ スタンダードパック

- A. 2.4mm スリーブ
- B. ブルー 2.0MICS ニードル

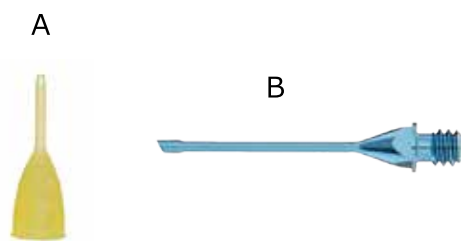

BL5115-4
Adaptive Fluidics™ ベーシックパック

- A. MICS スリーブ



上記すべてのパックにこれら製品が含まれています。

- 1. AFI チューブ付きカセット
- 2. メイヨートレイ、スクリーン、リモコン用カバー
- 3. プラグ
- 4. テストチャンバー
- 5. ニードルレンチ
- 6. ボトルスパイク



Stellaris Elite™ Vitrectomy Solutions


Combined Packs with Bi-Blade®

STERILE ② = 6

SE5523MVB / SE5523WVB ※2

23G Combined Pack

- A. 23G バイブレード ビトレクミーカッター
B. 23G イルミネーター
*Midfield (MVB) / Diffuse Wide Angle (WVB)
C. 23G バルブESAトロッカーシステム
D. 23G プラグ

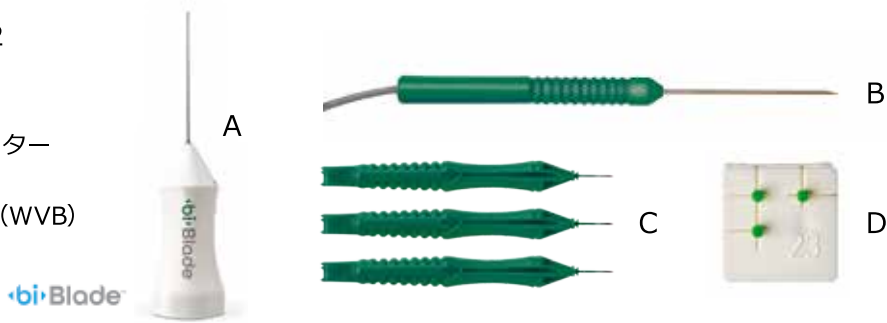

SE5525MVB / SE5525WVB ※2

25G Combined Pack

- A. 25G バイブレード ビトレクミーカッター
B. 25G イルミネーター
*Midfield (MVB) / Diffuse Wide Angle (WVB)
C. 25G バルブESAトロッカーシステム
D. 25G プラグ



SE5527MVB / SE5527WVB ※2

27G Combined Pack

- A. 27G バイブレード ビトレクミーカッター
B. 27G イルミネーター
*Midfield (MVB) / Diffuse Wide Angle (WVB)
C. 27G バルブESAトロッカーシステム




Posterior Packs with Bi-Blade®

STERILE ② = 6

SE5523MVB / SE5523WVB ※2

23G Posterior Pack


- A. 23G バイブレード ビトレクミーカッター
B. 23G イルミネーター
*Midfield (MVB) / Diffuse Wide Angle (WVB)
C. 23G バルブESAトロッカーシステム
D. 23G プラグ

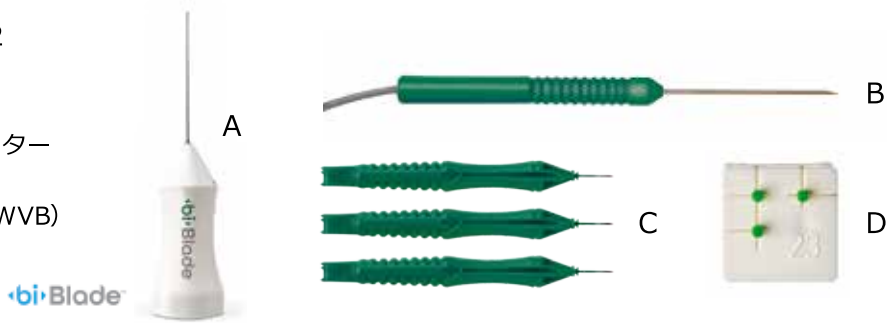

SE5525MVB / SE5525WVB ※2

25G Posterior Pack

- A. 25G バイブレード ビトレクミーカッター
B. 25G イルミネーター
*Midfield (MVB) / Diffuse Wide Angle (WVB)
C. 25G バルブESAトロッカーシステム
D. 25G プラグ

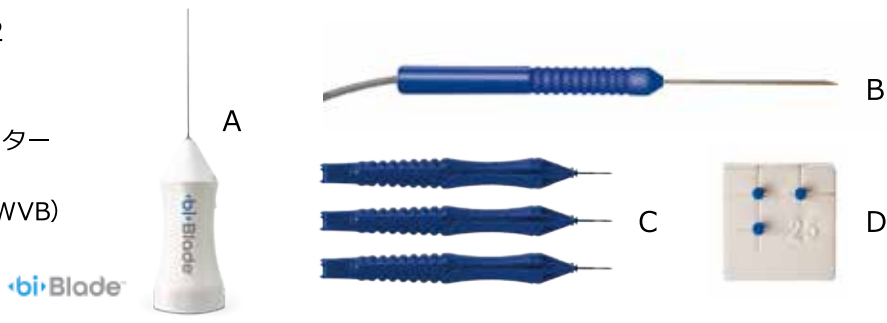

SE5427MVB ※2

27G Posterior Pack

- A. 27G バイブレード ビトレクミーカッター
B. 27G Midfield イルミネーター
C. 27G バルブESAトロッカーシステム



BL5280 デュアルインフュージョンライン ※4

BL5500 ベーシックパック (同時手術用) ※2

上記すべてのパックにこれら製品が含まれています。


1. AFI チューブ付きカセット
2. 吸引ライン
3. インフュージョンライン
4. メイヨートレイ、スクリーン、リモコン用カバー
5. プラグ
6. テストチャンバー
7. オス型ルアーカプラー
8. MICS スリーブ
9. プライミング用カップ
10. ニードルレンチ
11. ボトルスパイク
12. 三方活栓



BL5400 ベーシックパック (硝子体手術用) ※2

上記すべてのパックにこれら製品が含まれています。

1. AFI チューブ付きカセット
2. 吸引ライン
3. インフュージョンライン
4. メイヨートレイ、スクリーン、リモコン用カバー
5. プラグ
6. プライミング用カップ
7. オス型ルアーカプラー
8. ボトルスパイク
9. 三方活栓

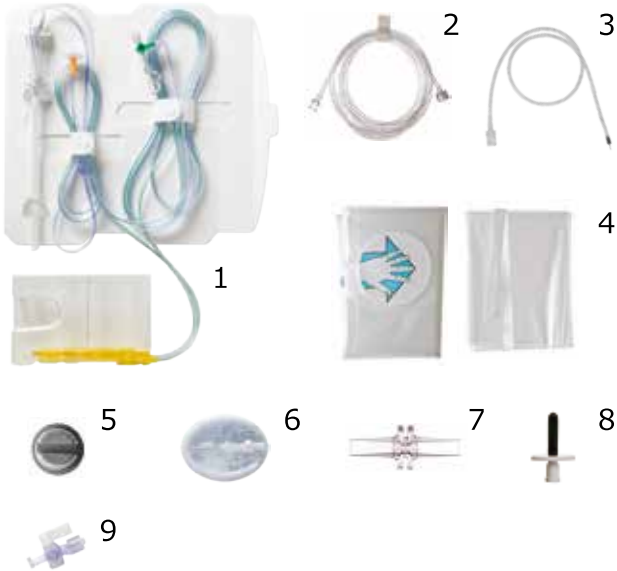

Phaco Sleeves ※3

STERILE ②  = 12

BL3118 1.8mm スリーブ



BL3124S 2.4mm スリーブ



DP5531 2.2mm スリーブ



Phaco Tips

 = 6

リユース ※5

BL3318 MICS ニードル 1.8 ストレート

BL3318A MICS ニードル 1.8 アングル 30°

シングルユース ※3

STERILE ②  = 6

BL3318S MICS ニードル 1.8 ストレート
(ニードルレンチ付)



BL3318AS MICS ニードル 1.8 アングル 30°
(ニードルレンチ付)



BL3420S MICS ニードル 2.0
(ニードルレンチ付)

Bipolar

CX9400 バイポーラコード ※6



シングルユース



E7918 バイポーラ電極 18G 直
(ペンシルタイプ) ※7
 = 10



E7923 バイポーラ電極 20G 直
(ペンシルタイプ) ※7
 = 10



E7933 バイポーラ 電極 27G 直
(ペンシルタイプ) ※8
 = 12



リユース

S20501 バイポーラ 電極 直
(ピンセットタイプ) ※9

I/A Handpiece & Tips

BL3160 マルチI/A ハンドピース ※10

85761 I/A ハンドピース 0.3mm 直 ※11
(シリコンハンドルとチップー体型)

BL3162 マルチI/Aチップ ※10
(0.4mm 直 シリコンスリーブ 20G)



Vitreotomy Cutters ※2

STERILE ②  = 6

*カッターを使用する際は、別途アンテリアビトレクトミーアダプターキットBL3190 (※2) が必要です。

BL5620 20G Stellaris Elite™ Anterior用

BL5626 20G Stellaris Elite™ Combo用



BL5623S 23G Stellaris Elite™ Anterior用

BL5625S 25G Stellaris Elite™ Anterior用



BL5627S 27G
Stellaris Elite™ Anterior用
バイブレードビトレクトミーカッター

Cutter for Stellaris Elite™ ※2

STERILE ②  = 6

SE5623B
Stellaris Elite™ Combo用
23G バイブレードビトレクトミーカッター



SE5625B
Stellaris Elite™ Combo用
25G バイブレードビトレクトミーカッター



SE5627B
Stellaris Elite™ Combo用
27G バイブレードビトレクトミーカッター



Valved Trocars ※2

STERILE ②  = 6

BL5281
23G ESA トロッカー・カニユーラ (3本入り)
(インフュージョンカニユーラ・プラグ付)



BL5282
25G ESA トロッカー・カニユーラ (3本入り)
(インフュージョンカニユーラ・プラグ付)



BL5240
27G ESA トロッカー・カニユーラ (3本入り)
(インフュージョンカニユーラ付)



BL5283
23G ESA トロッカー・カニユーラ (1本入り)

BL5285
25G ESA トロッカー・カニユーラ (1本入り)

BL5241
27G ESA トロッカー・カニユーラ (1本入り)

Mid-Field イルミネーター ※12

STERILE ②  = 6

BL5823M 23G



BL5825M 25G



BL5827M 27G



Diffuse Wide Angle イルミネーター ※12

STERILE ②  = 6

BL5823D 23G



BL5825D 25G



BL5827D 27G



Adjustable Chandelier ※12

STERILE ②  = 5

BL5234 23G
BL5235 25G



Universal Viscous Fluid Control Pack ※2

BL7600

STERILE ②  = 6



パックにはこれら製品が含まれています。

- ① バレル
- ② ブランジャー
- ③ ピストン
- ④ キャップ
- ⑤ VFIカニューレ (23G, 25G)
- ⑥ ハードカニューレ
- ⑦ エクストラクションカニューレ
- ⑧ VFチューブ
- ⑨ VFアダプター



仕様

販 売 名 : ステラリス 医療機器承認番号 : 22100BZX00788000

製品番号 : BL14455 (Stellaris Elite Combo)
BL15455 (Stellaris Elite Combo with integrated laser)
BL11145 (Stellaris Elite Anterior)

吸引

吸引制御 ロータリーベーンポンプシステム *Anterior
ベンチュリーポンプシステム *Combo
吸引圧 0～600mmHg (I/A及びVITモード)
10～600mmHg (USモード)

灌流

重圧落下方式 30～140cm (IVポール)
加圧方式 (AFI) 0～150mmHg

フェイコ

発振方式 ピエゾエレクトリック
発振周波数 28.5KHz
最大出力 35W (900Ω)
パルス超音波モード 1～250pps
Duty Cycle 5～95%

硝子体カッター

切除方式 空気駆動ギロチン方式
カットレート 30～2,500cpm *Anterior
30～7,500cpm *Combo

眼内照明 *Combo

光源ランプ1 キセノンランプ
光源ランプ2 キセノンランプ
出力 (光束量) 18lm以上 (ライト パイプ先端部)

バイポーラ

最大出力 7.5W (100Ω)
周波数 1MHz
出力範囲 0～100%

フットコントローラー

稼働方式 無線 (10m範囲) or 有線

リモートコントローラー

稼働方式 赤外線 (ディスプレイから4.5m以内)

定格電源

電源入力 100 - 240VAC, 50/60Hz, 1000VA

重量・サイズ

重量 114kg
サイズ 457mm (W) X 457mm (D) X 1220mm (H)
(IVポールを除く)